



TauroLockTM

CE 0123

ANTIMIKROBIELLE KATHETER-LOCKLÖSUNG

TauroLock™

CE 0123



INDIKATION:

TauroLock™ wird als Katheterverschlusslösung verwendet, um die Durchgängigkeit des Gefäßzugangs aufrechtzuerhalten. Durch die Schaffung von für Bakterien und Pilzen wachstumsfeindlichen Umgebungsbedingungen wird außerdem das Risiko von katheterbedingten Blutstrominfektionen (CRBSI) verringert.

ZUSAMMENSETZUNG/SPEZIFIKATIONEN:

TauroLock™ enthält antimikrobielle und antikoagulative Substanzen. Die Wirkstoffe in TauroLock™ sind (cyclo)-Taurolidin und Citrat (4%). Das Produkt ist steril filtriert und wird als klare, aseptisch abgefüllte und pyrogenfreie Lösung geliefert. Die Lösung wird in venösen Gefäßzugangssystemen (Katheter und Portsysteme) verwendet. Sie wird nach der Behandlung (z.B. Dialyse, onkologische Behandlung, parenterale Ernährung) in das Lumen des Zugangssystems instilliert.

ANWENDUNG:

Im Anschluss an die jeweilige Behandlung wird das Zugangssystem gründlich mit Kochsalz (mind. 10 ml) gespült. Danach wird TauroLock™ unter strikter Einhaltung des Füllvolumens in das System instilliert. Die Lösung muss vor Beginn der nächsten Behandlung aus dem Zugangssystem entnommen werden. Sollte die Entfernung der Lösung vor der nächsten Nutzung des Gefäßzugangs nicht möglich sein, ist auch langsames Spülen (d.h. nicht schneller als 1 Milliliter pro 3 Sekunden) von TauroLock™ klinisch verträglich. Anschließend wird wieder mit 10 ml Kochsalz gespült.

KONTRAINDIKATIONEN:

TauroLock™ ist bei Patienten mit bekannter Allergie gegen Citrat oder (cyclo)-Taurolidin kontraindiziert, und bei Patienten, die gleichzeitig Arzneimittel einnehmen, von denen bekannt ist, dass sie in Verbindung mit (cyclo)-Taurolidin oder Citrat unerwünschte Interaktionen verursachen.

LAGERUNG/TRANSPORT:

TauroLock™ ist bei 15 – 30 °C zu lagern. Nicht gefrieren. TauroLock™ darf nicht unter Frostbedingungen transportiert werden. Ampullen sind als Einzeldosis vorgesehen. Durchstechflaschen enthalten Mehrfachdosen, die Locklösung ist nach erstmaliger Entnahme innerhalb von 48 Stunden aufzubrauchen.

ANMERKUNG:

Diese Produktinformation ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung des Herstellers.



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	PZN-Nr.
TP-01-3	TauroLock™ Katheter-Locklösung 3 mL Ampulle (Einzeldosis)	10 x 3 mL	10 19 28 39
TP-01-5	TauroLock™ Katheter-Locklösung 5 mL Ampulle (Einzeldosis)	10 x 5 mL	00 90 05 60
TP-01-10	TauroLock™ Katheter-Locklösung 10 mL Durchstechflasche (Mehrfachdosis)	100 x 10 mL	07 25 99 71

Hersteller:



TauroPharm GmbH
August-Bebel-Str. 51
D-97297 Waldbüttelbrunn
Tel.: +49 (0) 931 304 299-0

ISO 13485

Vertrieb Deutschland:



Tauro-Implant GmbH
Porschestraße 4
D-21423 Winsen/ Luhe
Tel.: +49 (0) 4171 890 81-80
Fax: +49 (0) 4171 890 81-89
www.tauro-implant.de