



# TauroLock™ U 25000

CE 0123

ANTIMIKROBIELLE KATHETER-LOCKLÖSUNG

# TauroLock™

U  
25.000

CE 0123

Frei von  
Antibiotika!

## INDIKATION:

TauroLock™-U25.000 wird als Katheterverschlusslösung verwendet, um die Durchgängigkeit des Gefäßzugangs aufrechtzuerhalten. Durch die Schaffung von für Bakterien und Pilzen wachstumsfeindlichen Umgebungsbedingungen wird außerdem das Risiko von katheterbedingten Blutstrominfektionen (CRBSI) verringert.

## ZUSAMMENSETZUNG/SPEZIFIKATIONEN:

TauroLock™-U25.000 enthält Substanzen zur Aufrechterhaltung der Durchgängigkeit und zur Vermeidung von Infektionen im Zugangssystem. Die Wirkstoffe in TauroLock™-U25.000 sind (cyclo)-Taurolidin, Citrat (4%) und Urokinase (25.000 IU). Das Produkt ist steril filtriert und wird als klare, aseptisch abgefüllte und pyrogenfreie Lösung geliefert. Urokinase wird in einer separaten Durchstechflasche geliefert und wird mit dem Inhalt der Ampulle unmittelbar vor der Verwendung rekonstituiert. Jede Ampulle enthält 5 ml (Einzeldosis).

## ANWENDUNG:

TauroLock™-U25.000 wird durch Zugabe von TauroLock™ zu Urokinase in der Durchstechflasche hergestellt. Es entsteht eine klare Lösung. Im Anschluss an die jeweilige Behandlung (z.B. Dialyse) wird das Zugangssystem mit Kochsalzlösung (min. 10 ml) gründlich gespült. Anschließend wird TauroLock™-U25.000 unter strikter Einhaltung des Füllvolumens in das Katheter-Lumen instilliert. Die Lösung muss vor Beginn der nächsten Behandlung aus dem Zugangssystem entnommen werden. Anschließend wird wieder mit 10 ml Kochsalzlösung gespült.

## KONTRAINDIKATIONEN:

TauroLock™-U25.000 ist bei Patienten mit nachgewiesener Urokinase-Unverträglichkeit kontraindiziert sowie bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Citrat oder (cyclo)-Taurolidin, ferner bei Patienten, die gleichzeitig Arzneimittel einnehmen, bei denen unerwünschte Wechselwirkungen mit Urokinase, Citrat oder (cyclo)-Taurolidin nachgewiesen sind.

## LAGERUNG/TRANSPORT:

TauroLock™-U25.000 ist bei 15 – 25 °C aufzubewahren. TauroLock™-U25.000 darf nicht unter Frostbedingungen transportiert werden. Die rekonstituierte Lösung muss sofort verwendet werden.

## ANMERKUNG:

Diese Produktinformation ersetzt nicht die Gebrauchsanweisung des Herstellers.



Art.-Nr.	Bezeichnung	VE	PZN-Nr.
TP-05	TauroLock™-U25.000 Katheter-Locklösung 5 mL Durchstechflasche (Einzeldosis)	5 x 5 mL	05 51 98 82

Hersteller:

**TauroPharm**  
GmbH

TauroPharm GmbH  
August-Bebel-Str. 51  
D-97297 Waldbüttelbrunn  
Tel.: +49 (0) 931 304 299-0

ISO 13485

Vertrieb Deutschland:

**TAURO**  
IMPLANT  
GMBH

Tauro-Implant GmbH  
Porschestraße 4  
D-21423 Winsen/ Luhe  
Tel.: +49 (0) 4171 890 81-80  
Fax: +49 (0) 4171 890 81-89  
www.tauro-implant.de