



TauroPace™

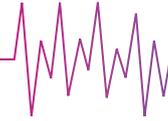

in der CIED-Implantation

SCHRITT FÜR SCHRITT
ANLEITUNG

PRÄOPERATIV:

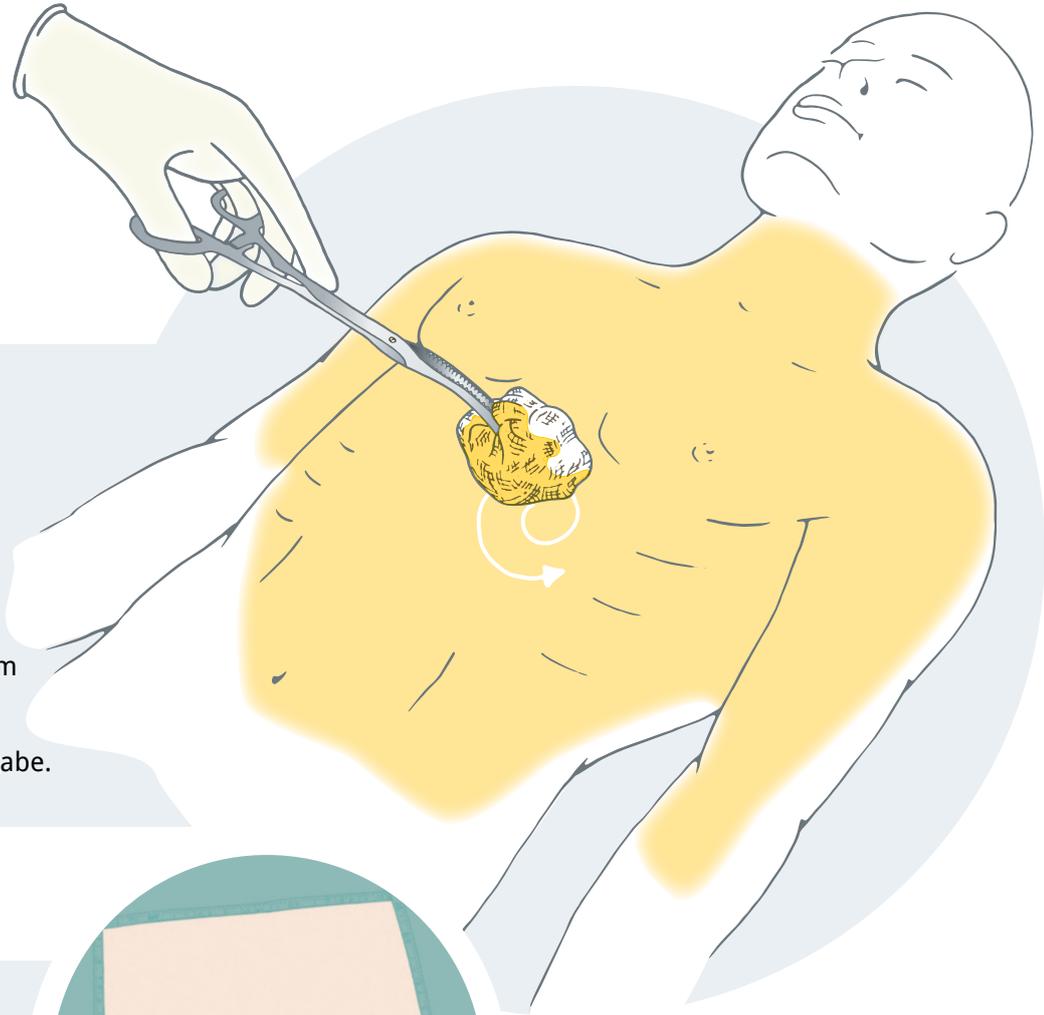

1


Lagern Sie den Patienten.

(Führen Sie gegebenenfalls einen Muskelfaszienblock durch.)

Die Haut des Patienten ist mit einem geeigneten Hautantiseptikum zu desinfizieren. Beachten Sie die Einwirkungszeit gem. Herstellerangabe.


2

Decken Sie den Patienten steril ab.

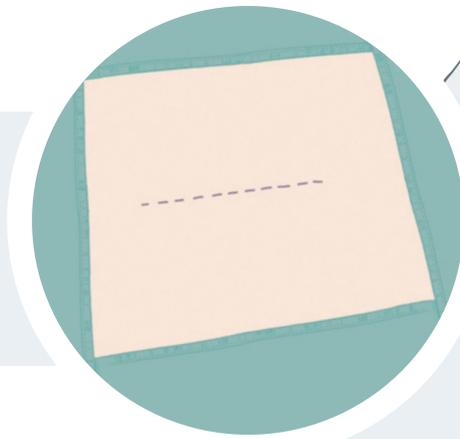

3

Geben Sie **TauroPace™** in ein Einmalgefäß mit steriler Gaze.

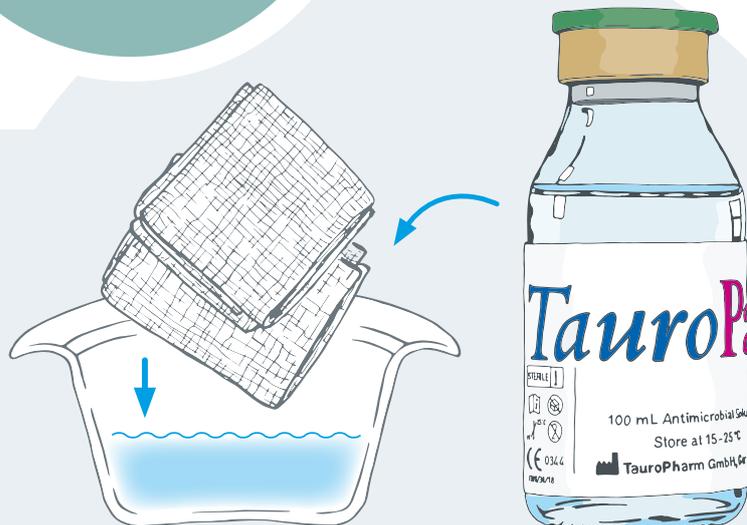

 TauroPace™

 Hautantiseptikum




OPERATIV:

1


Nach Hautschnitt und Punktion/Präparation der Vene wischen Sie die Schleuse/Dilatator mit **TauroPace™** ab und implantieren Sie beide.

5 ml

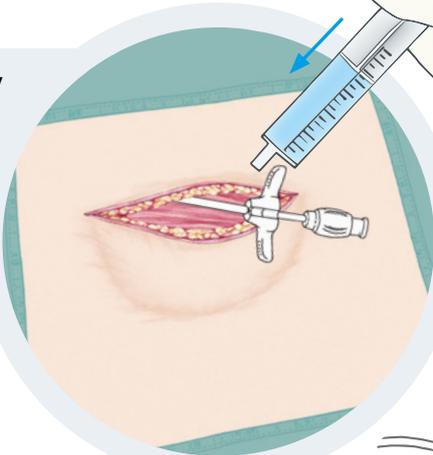

2

Liegt die Schleuse, befeuchten Sie diese mit **TauroPace™**.

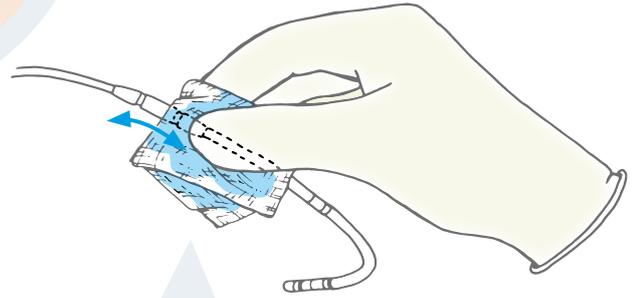


3


Nehmen Sie die erste Schrittmachersonde und wischen Sie diese mit einer mit **TauroPace™** getränkten Gaze ab, mobilisieren Sie dabei die Fixierhülle mit der mit **TauroPace™** getränkten Gaze (WICHTIG).

4

Implantieren Sie die Sonde, bringen Sie die Fixierhülle mit **TauroPace™** getränkter Gaze in finale Position.

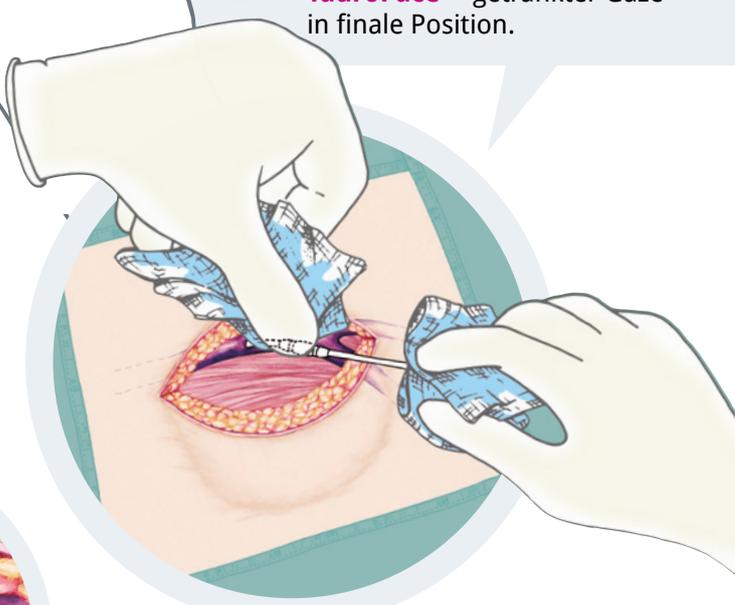

5 ml

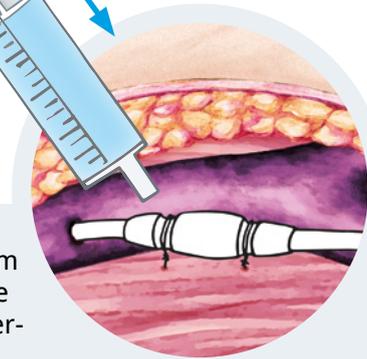

 TauroPace™

5

Fixieren Sie die Fixierhülle am Patienten und befeuchten Sie Fixierhülle und Schrittmachersonde mit **TauroPace™**.


6

Verfahren Sie analog mit allen zu implantierenden Sonden. Im Rahmen einer Upgrade Revision, befeuchten und wischen Sie bereits implantierte Schrittmachersonden ab.



7

Entnehmen Sie den sterilen Generator aus der Packung mithilfe einer mit **TauroPace™** getränkten Gaze und befeuchten Sie den Generator.


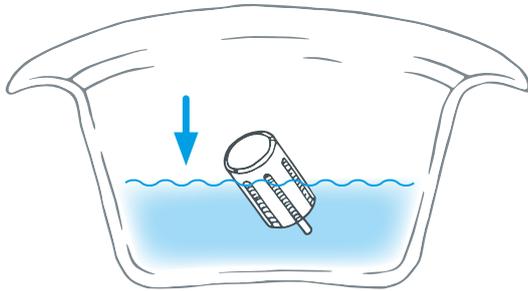


8

Befeuchten Sie den Drehmomentschlüssel mit **TauroPace™**.

9

Stecken Sie die Sonden in den Generator indem Sie beide Komponenten mit einer mit **TauroPace™** getränkten Gaze fixieren.

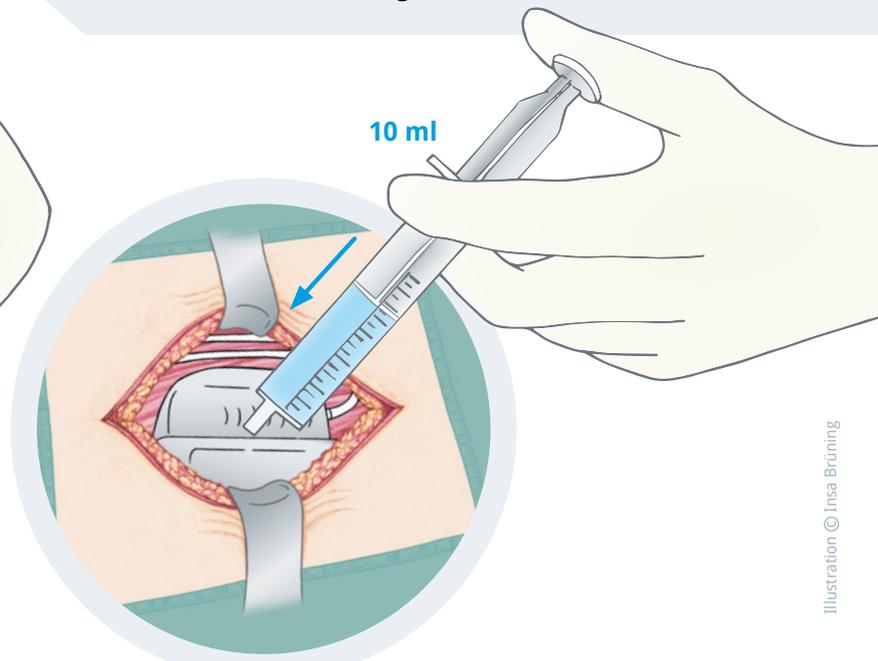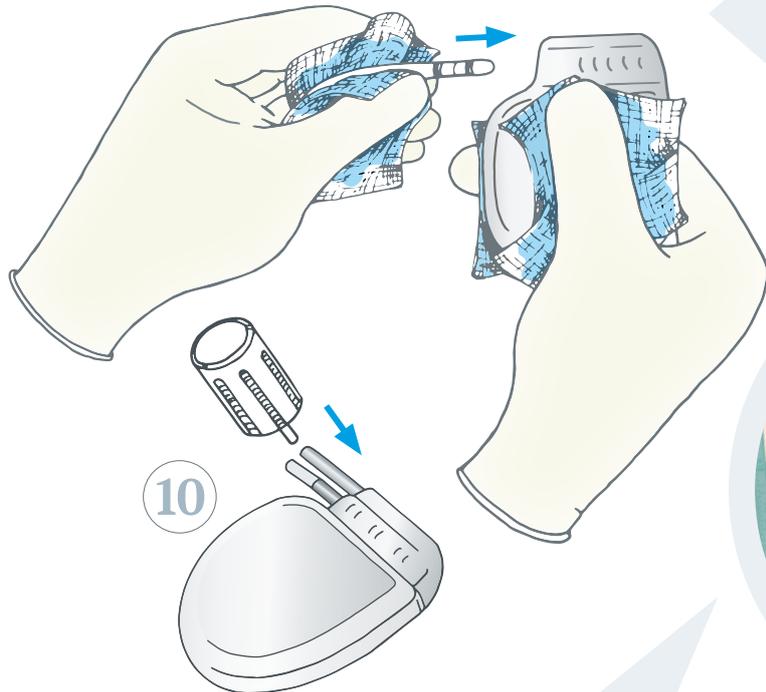

10

Stecken Sie alle Komponenten in die Schrittmachertasche (präferentiell submuskulär).

11


Befeuchten sie alle Schrittmacherkomponenten mit **TauroPace™**.

12

Entfernen Sie potentiell überschüssiges **TauroPace™** durch sanften Druck von aussen auf die Tasche und Aufnahme der Flüssigkeit mithilfe einer **TauroPace™** Gaze.

Verschließen Sie die Wunde lageweise.

POSTOPERATIV:

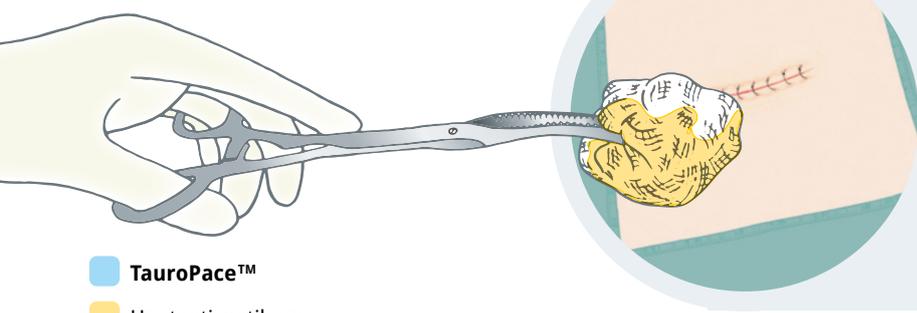

1

Desinfizieren Sie die Naht mit einem geeigneten Hautantiseptikum.

2

Applizieren Sie einen sterilen Druckverband.

Es sollte der gesamte Inhalt einer Flasche **TauroPace™** pro Patient verwendet werden.

- TauroPace™
- Hautantiseptikum