


TauroPace™



Implantation subkutaner Defibrillator

SCHRITT FÜR SCHRITT
ANLEITUNG

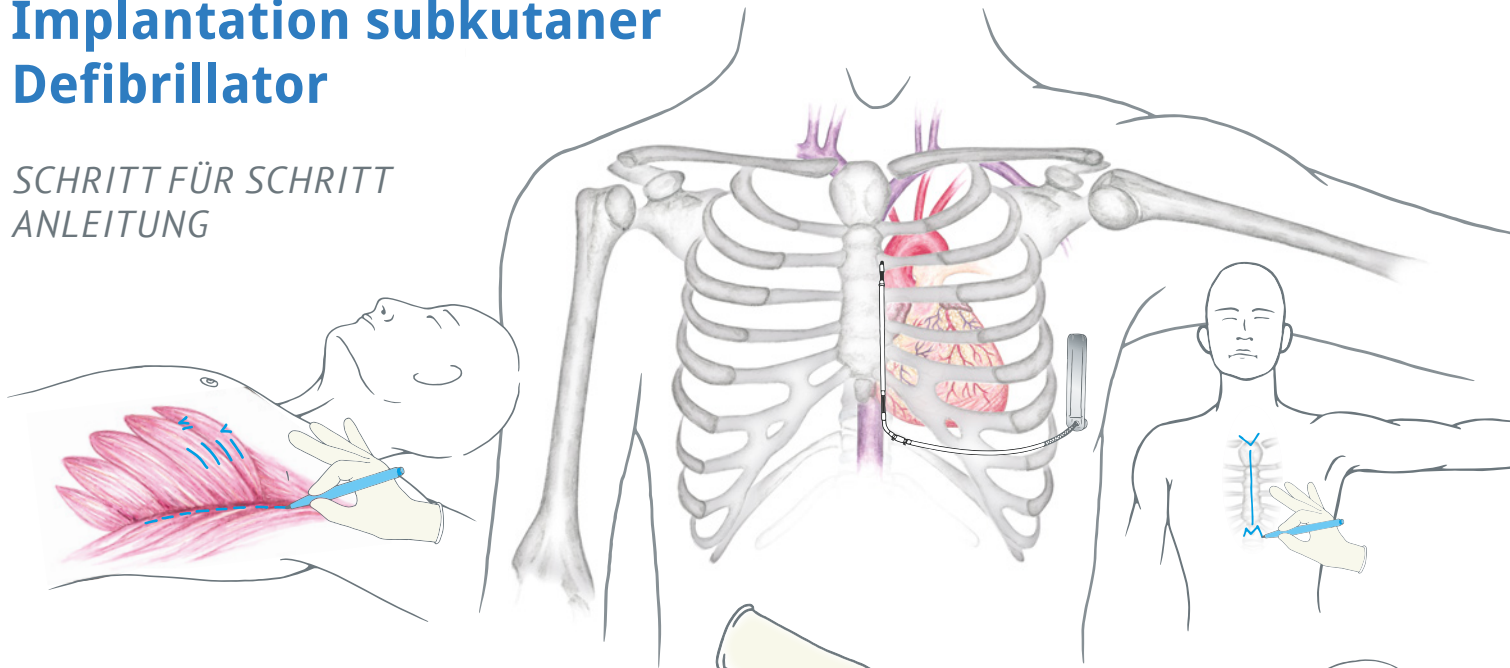


PRÄOPERATIV:

Lagern Sie den Patienten.

1

(Führen Sie gegebenenfalls einen Muskelfaszienblock durch.)

Die Haut des Patienten ist mit einem geeigneten Hautantiseptikum zu desinfizieren. Beachten Sie die Einwirkungszeit gem. Herstellerangabe.

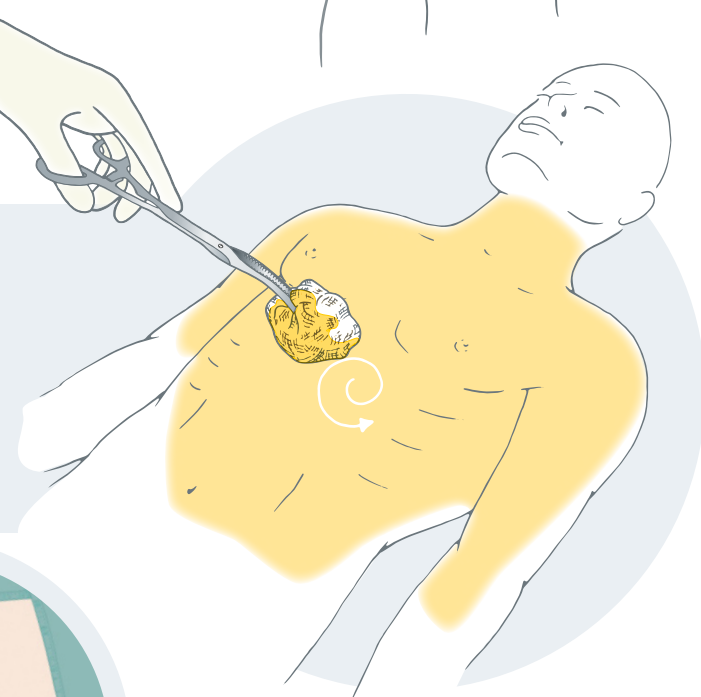


2

Decken Sie den Patienten steril ab.



3

Geben Sie **TauroPace™** in ein Einmalgefäß mit steriler Gaze.

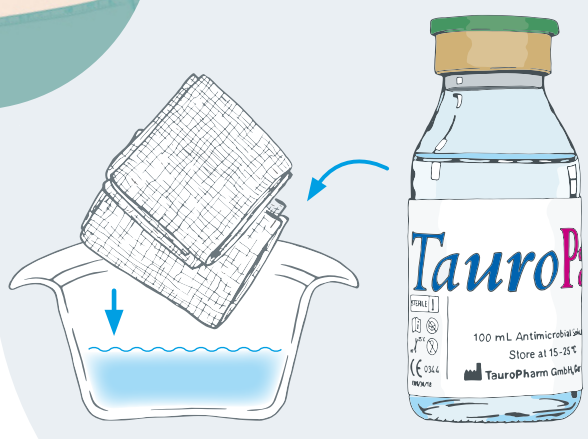


- TauroPace™
- Hautantiseptikum



OPERATIV:


1

Inzidieren Sie im Bereich des kaudalen Endes des Xyphoids und bringen Sie Nahtmaterial an. Befeuchten Sie das Nahtmaterial mit **TauroPace™**.

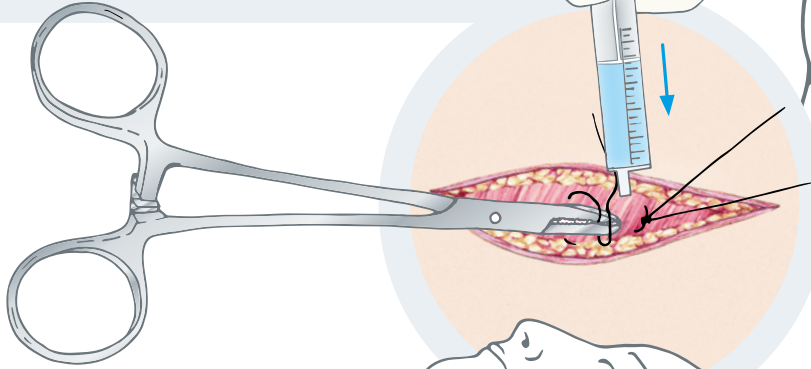

2



Präparieren Sie die Generator-Tasche an geeigneter Position. Bringen Sie Nahtmaterial ein und befeuchten Sie das Nahtmaterial mit **TauroPace™**.




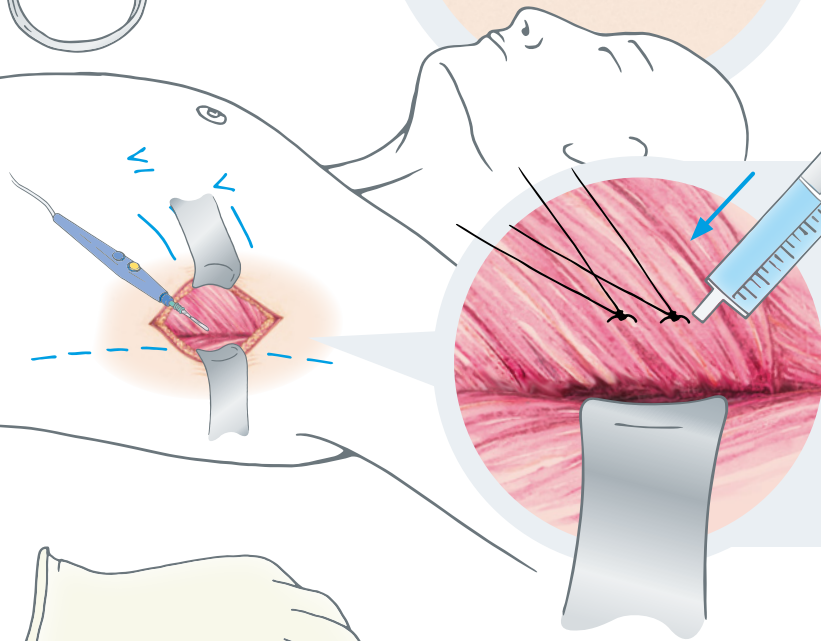


3

Tunneln Sie mit dem aufbereiteten Trokar von der Inzision im Bereich des Xyphoids in Richtung Generator Tasche, verbinden Sie die Sonde mit dem kaudalen Ende des Trokars und ziehen Sie die Sonde in Richtung Xyphoid.

Während des Zurückziehens der Sonde wischen Sie diese mit einer **TauroPace™**-getränkten Gaze simultan ab.

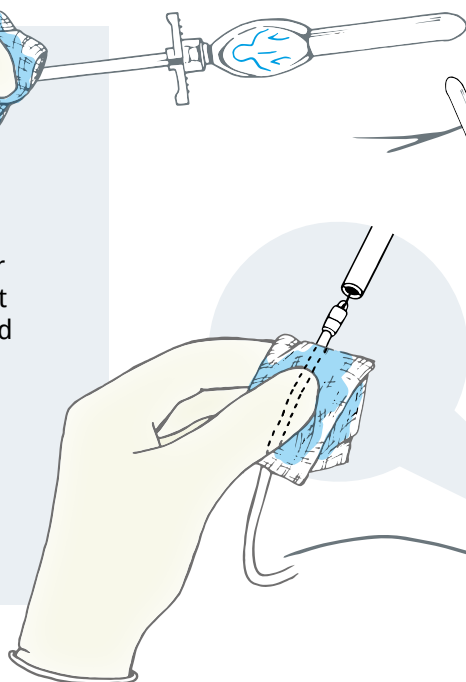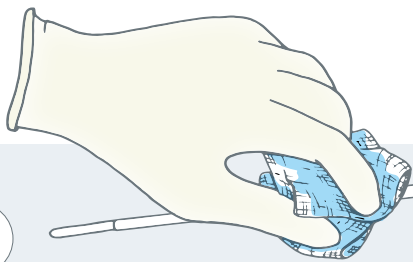

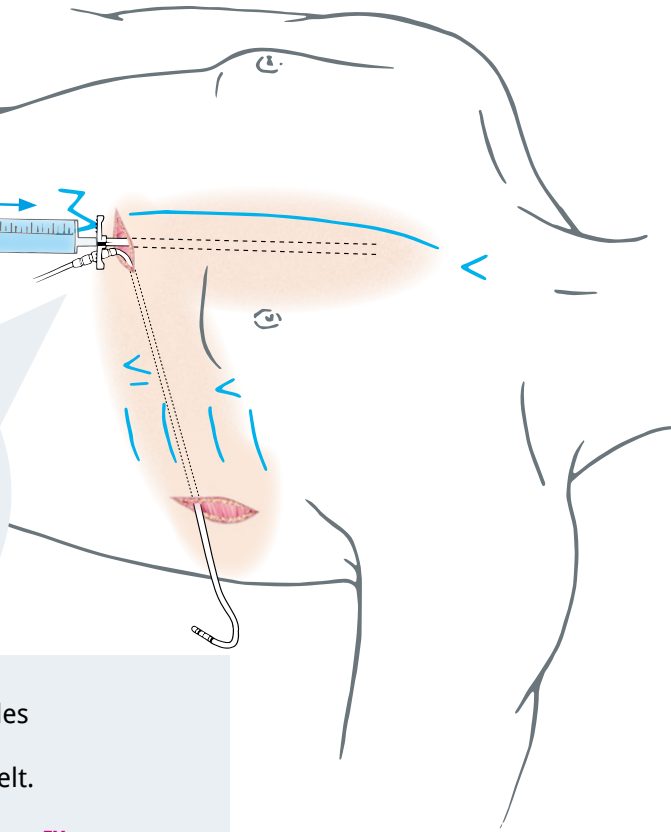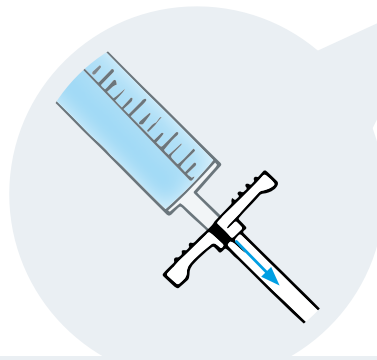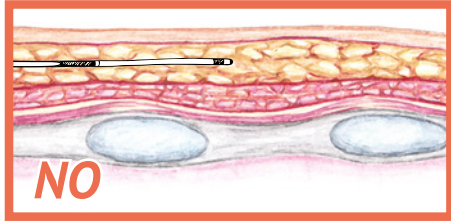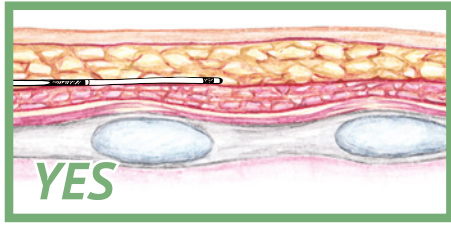


4

Nach Einbringen der Schleuse in sternalen Position mithilfe des aufbereiteten Trokars, füllen Sie die Schleuse in subkutaner Position mit **TauroPace™**, bis dieses aus der Schleuse sprudelt.

Implantieren Sie die Shock-Coil in sternalen Position. **TauroPace™** wird dadurch verdrängt und Sie verhindern die Implantation von Luft.


5

Fixieren Sie die Sonde in dieser Position an der Fixierhülse im Bereich der Inzision (Xyphoid) und befeuchten Sie die Komponenten mit **TauroPace™**. Entfernen Sie die Schleuse.

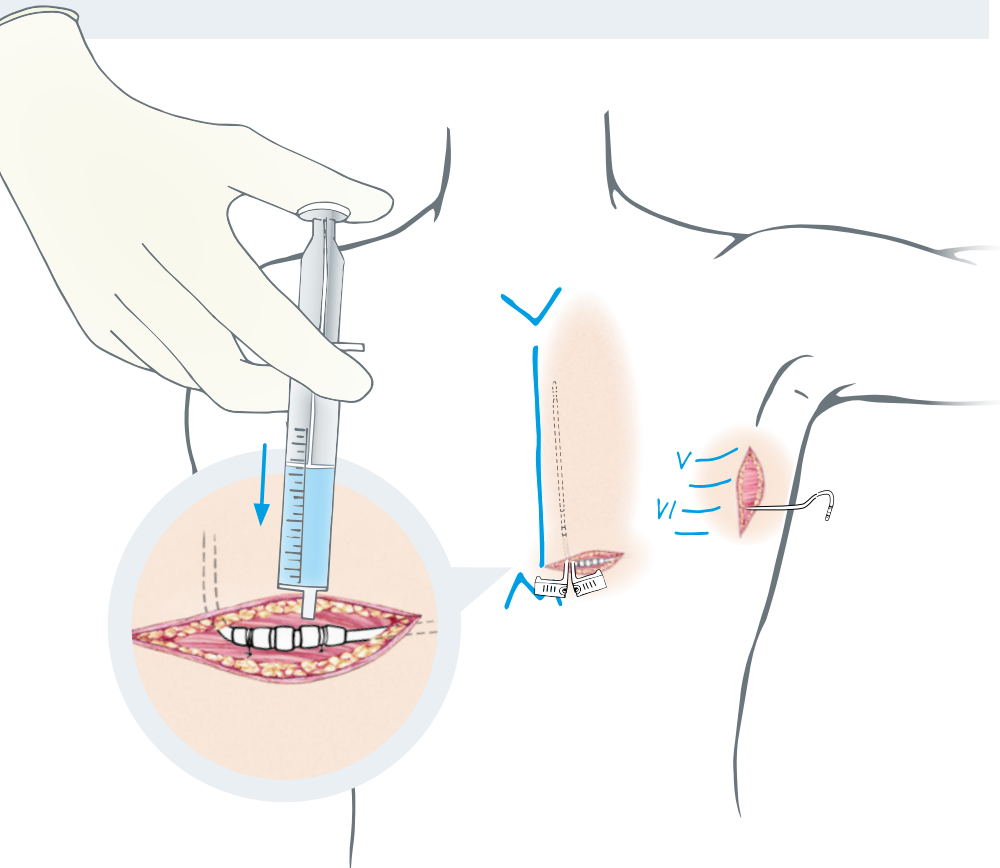


6

Entnehmen Sie den sterilen Generator aus der Packung mithilfe einer mit **TauroPace™** getränkten Gaze und befeuchten Sie den Generator.

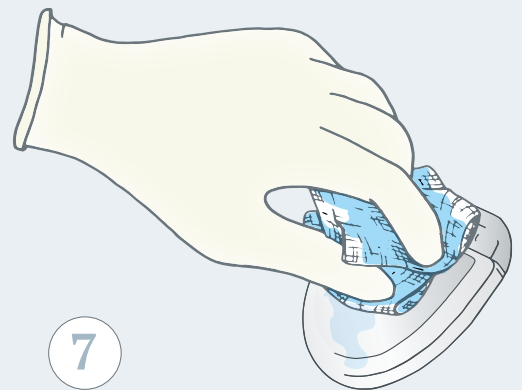

7

Befeuchten Sie den Drehmoment-schlüssel mit **TauroPace™**.

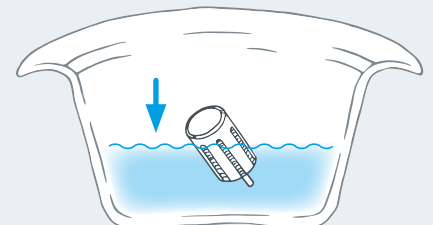



8

Stecken Sie die Sonden in den Generator indem Sie beide Komponenten mit einer mit **TauroPace™** getränkten Gaze fixieren.


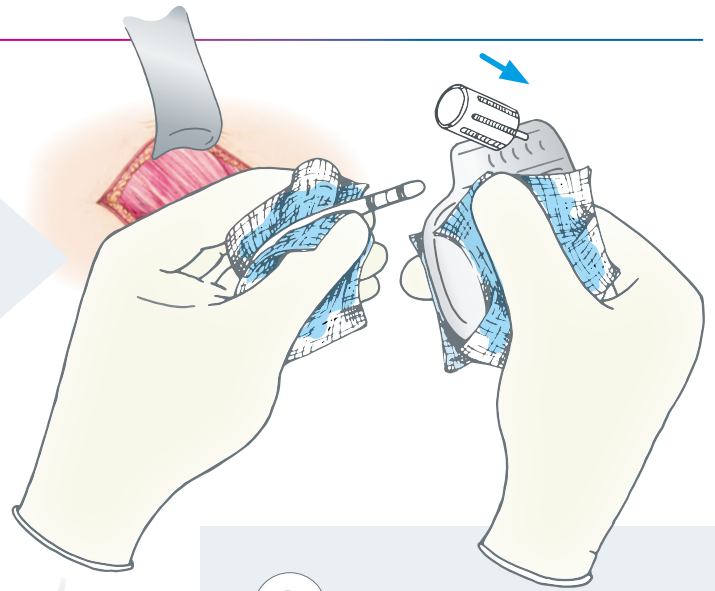


Illustration © Insa Brüning

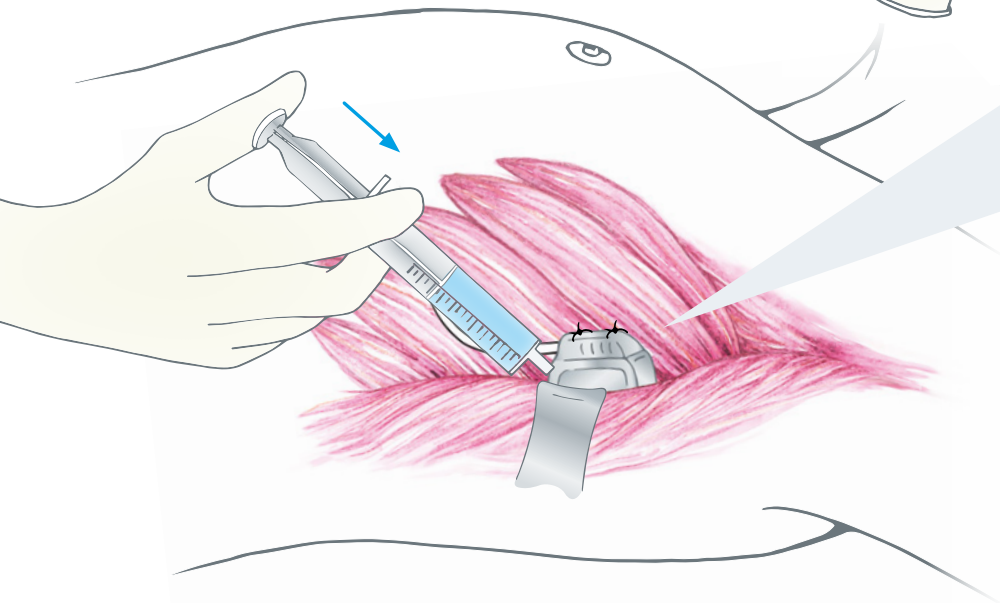

9

Nehmen Sie den Rest von **TauroPace™** und poolen Sie den mit Nahtmaterial fixierten Generator, damit dieser sich optimal positionieren kann.


10

Entfernen Sie potentiell überschüssiges **TauroPace™** durch sanften Druck von aussen auf die Tasche und Aufnahme der Flüssigkeit mithilfe einer **TauroPace™** Gaze.

Verschließen Sie die Wunde lageweise.

- TauroPace™
- Hautantiseptikum

POSTOPERATIV:

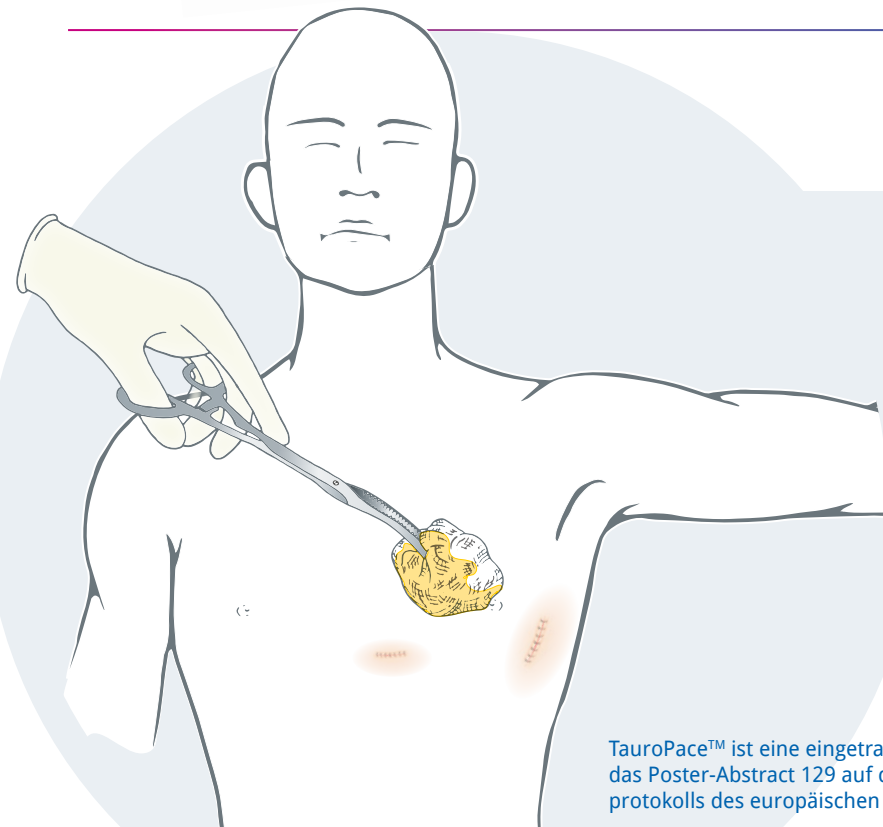

1

Desinfizieren Sie die Nähte mit einem geeigneten Hautantiseptikum.

2

Applizieren Sie einen sterilen Druckverband.

Es sollte der gesamte Inhalt einer Flasche **TauroPace™** pro Patient verwendet werden.