


# TauroPace™



## im CIED-Wechsel und der Revision

SCHRITT FÜR SCHRITT  
ANLEITUNG

### PRÄOPERATIV:

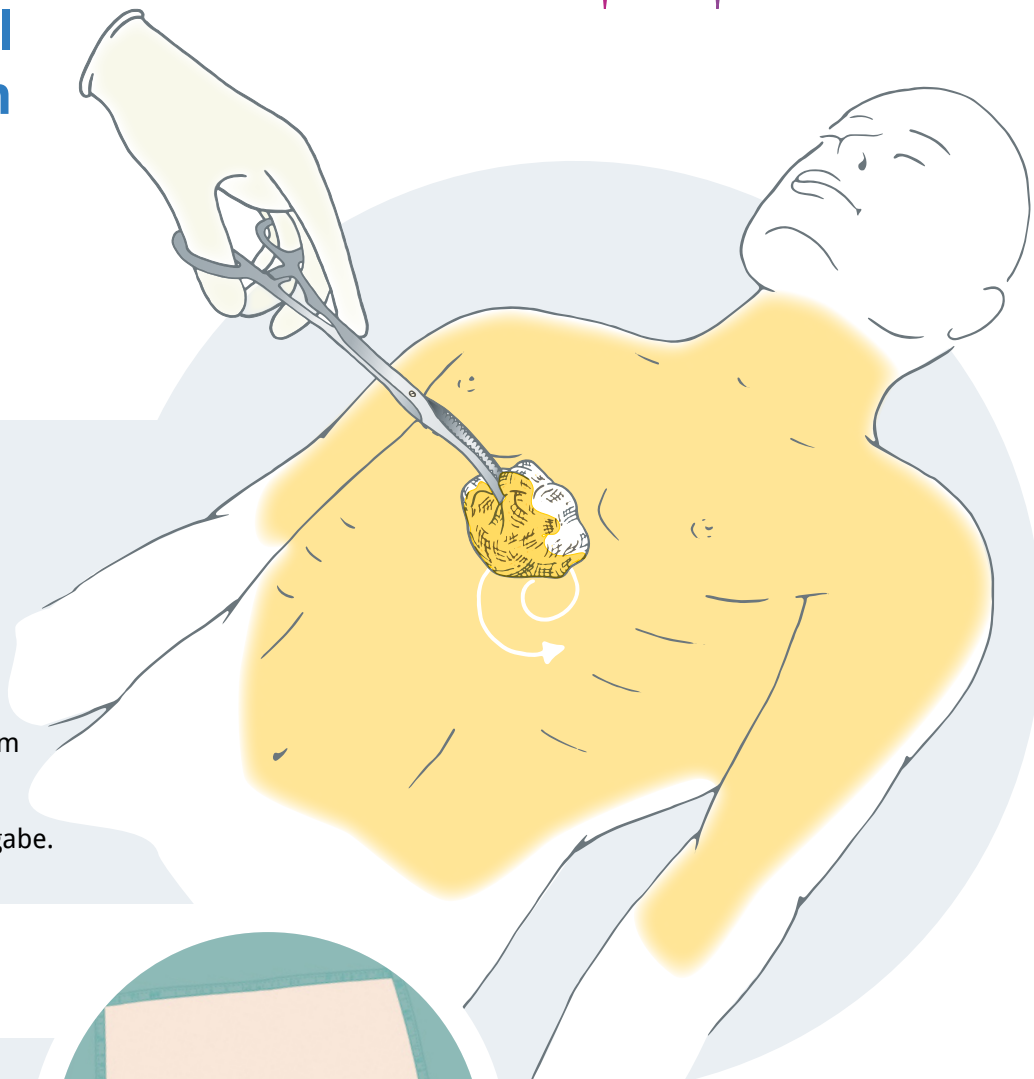

1

Lagern Sie den Patienten.

(Führen Sie gegebenenfalls einen  
Muskelfaszienblock durch.)

Die Haut des Patienten ist mit einem  
geeigneten Hautantiseptikum zu  
desinfizieren. Beachten Sie die  
Einwirkungszeit gem. Herstellerangabe.


2



Decken Sie den Patienten steril ab.



3


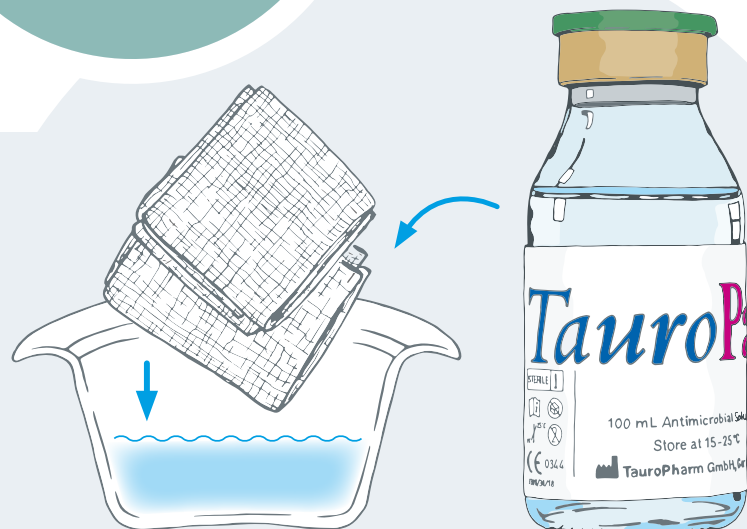
Geben Sie **TauroPace™** in ein  
Einmalgefäß mit steriler Gaze.



-  TauroPace™
-  Hautantiseptikum




## OPERATIV:

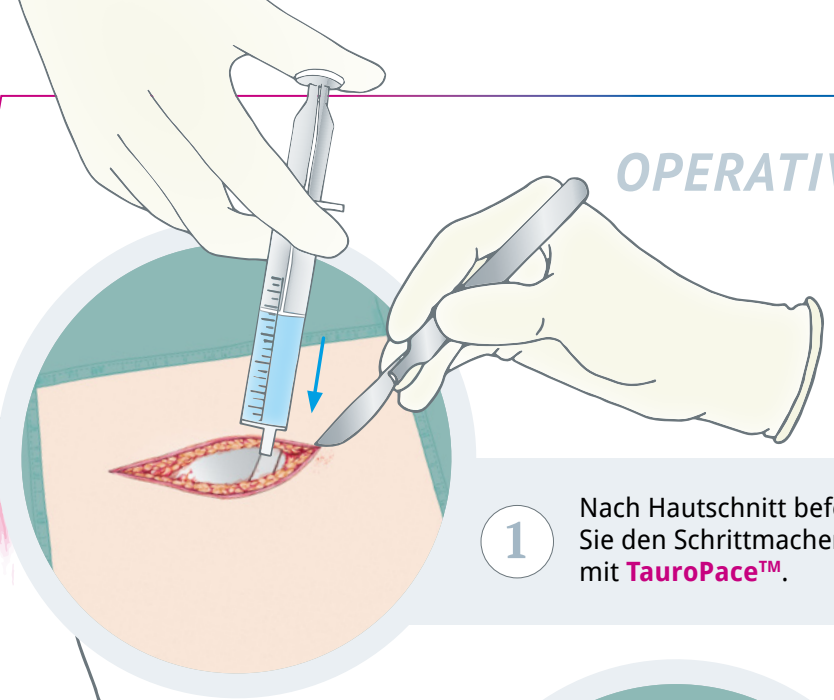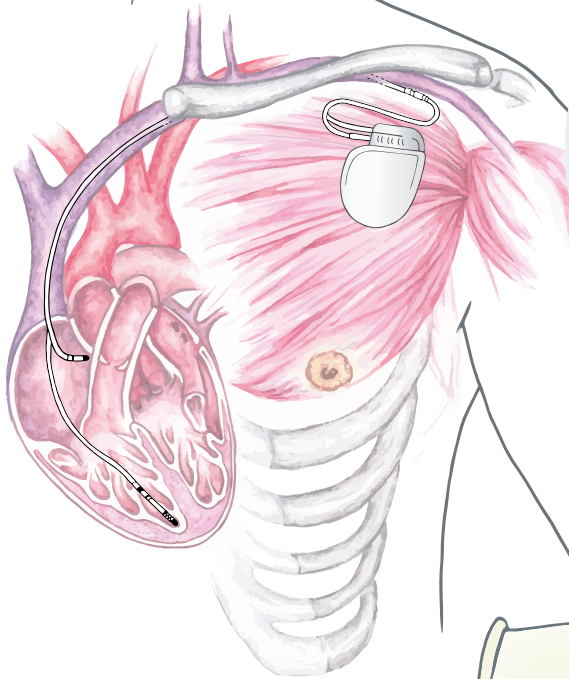


1 Nach Hautschnitt befeuchten Sie den Schrittmacher/ICD mit **TauroPace™**.

Mobilisieren Sie den Generator.

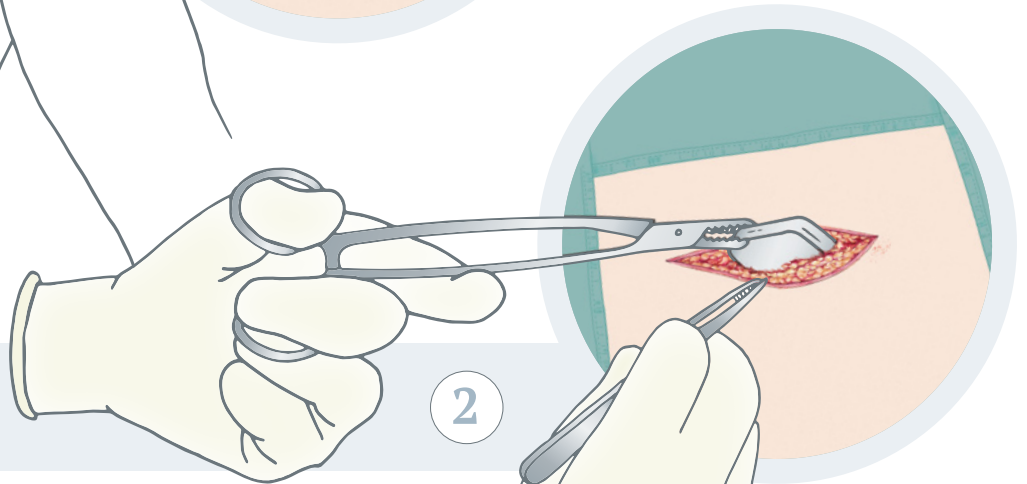


2


3 Befeuchten Sie den Drehmomentschlüssel mit **TauroPace™**.

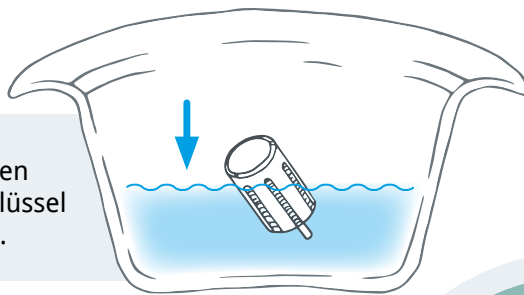


4

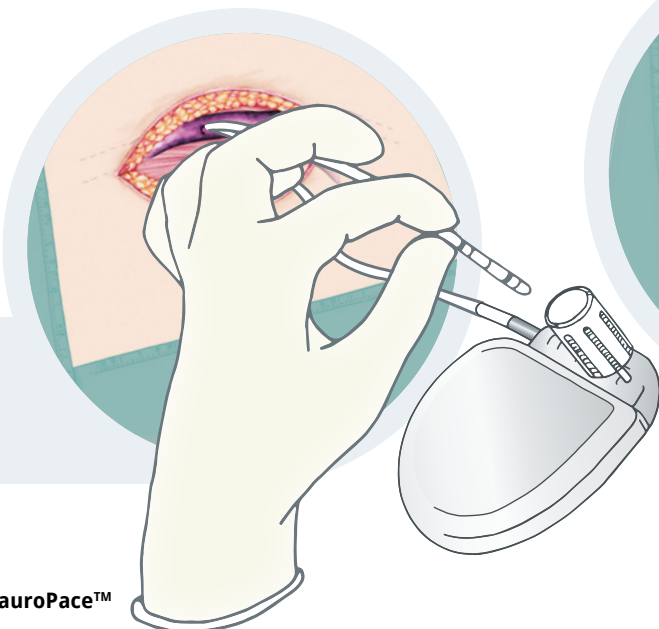


5

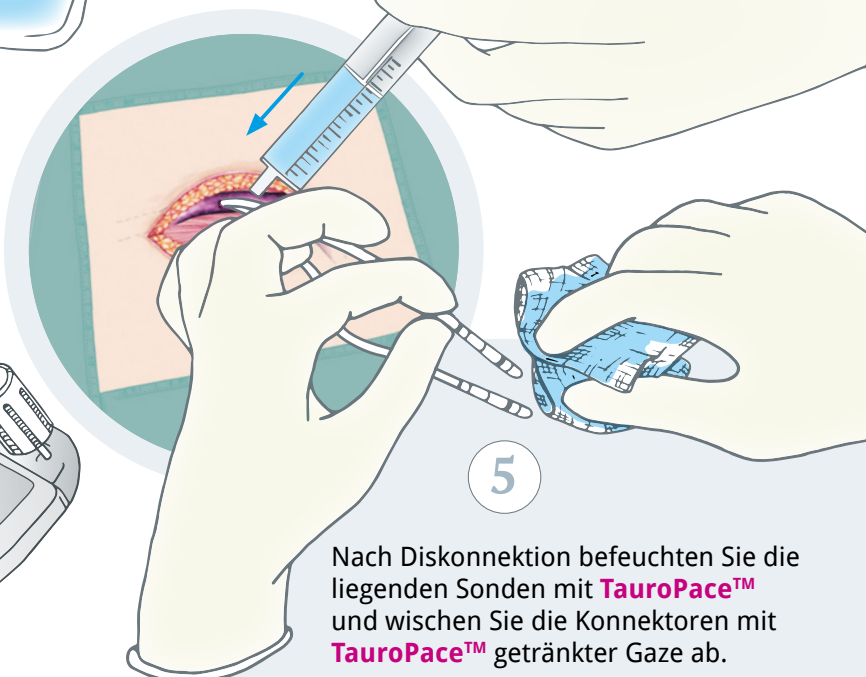

Nach Diskonnection befeuchten Sie die liegenden Sonden mit **TauroPace™** und wischen Sie die Konnektoren mit **TauroPace™** getränkter Gaze ab.

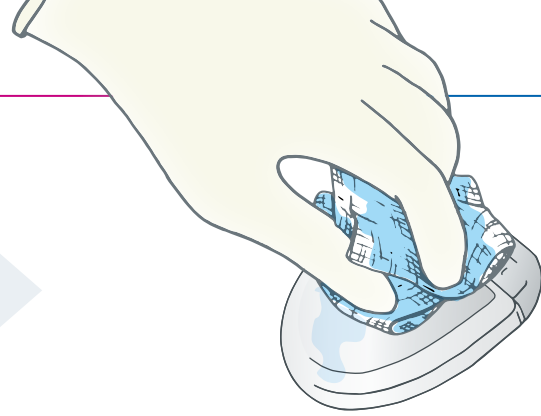


**6** Entnehmen Sie den sterilen Generator aus der Packung mithilfe einer mit **TauroPace™** getränkten Gaze und befeuchten Sie den Generator.

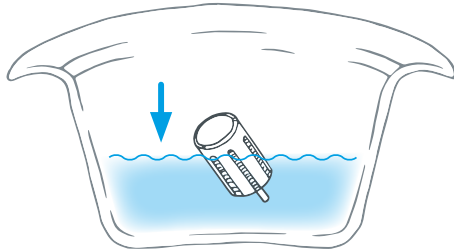


**7** Befeuchten Sie den Drehmomentschlüssel mit **TauroPace™**.

**8** Stecken Sie die Sonden in den Generator indem Sie beide Komponenten mit einer mit **TauroPace™** getränkten Gaze fixieren.

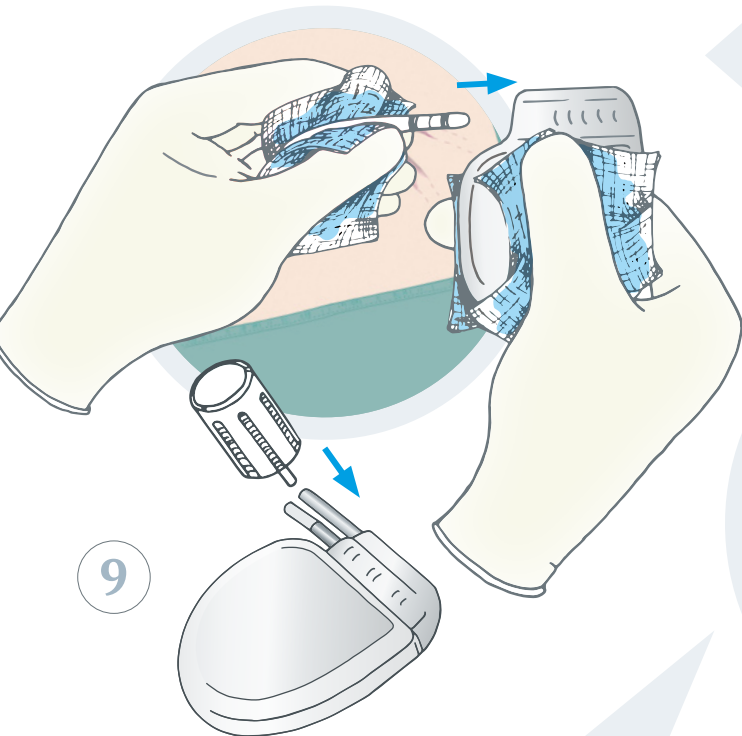

**9**

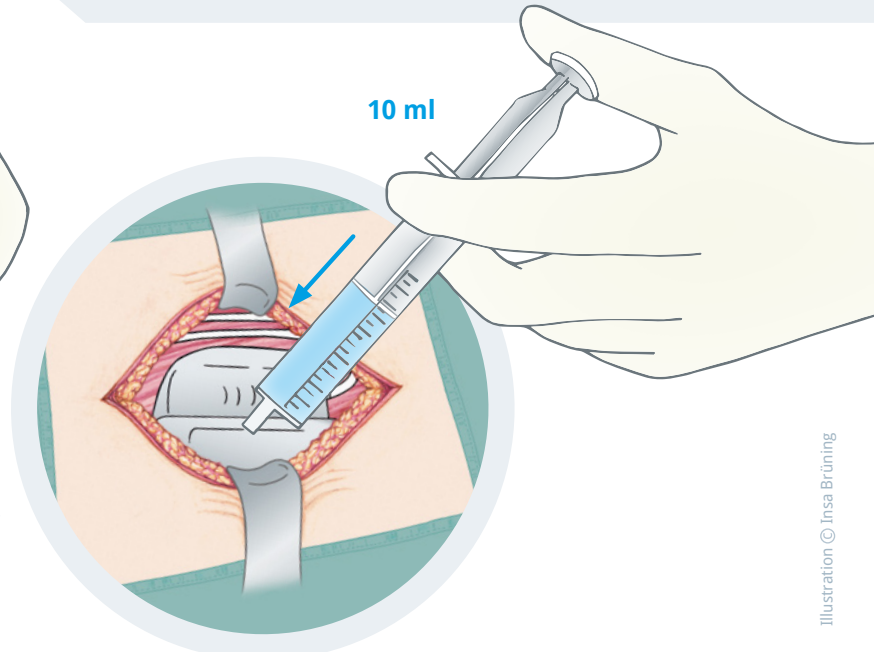


**10** Stecken Sie alle Komponenten in die Schrittmachertasche.

**11** Befeuchten sie alle Schrittmacherkomponenten mit **TauroPace™**.

Entfernen Sie potentiell überschüssiges **TauroPace™** durch sanften Druck von aussen auf die Tasche und Aufnahme der Flüssigkeit mithilfe einer **TauroPace™** Gaze.

Verschließen Sie die Wunde lageweise.

**POSTOPERATIV:**

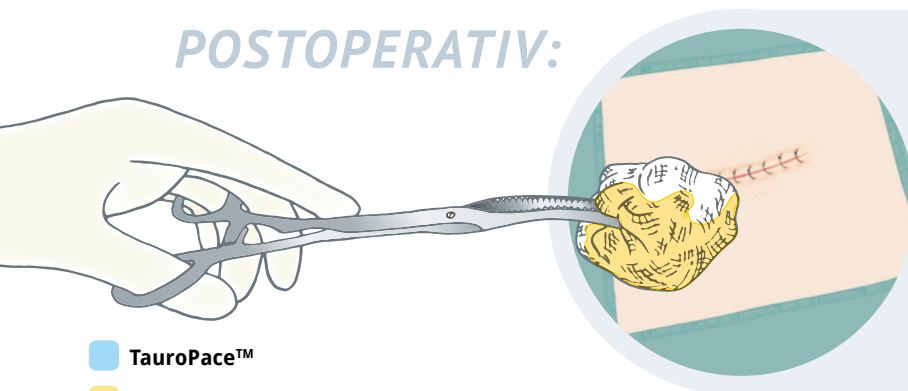

**1** Desinfizieren Sie die Naht mit einem geeigneten Hautantiseptikum.

**2** Applizieren Sie einen sterilen Druckverband.

Es sollte der gesamte Inhalt einer Flasche **TauroPace™** pro Patient verwendet werden.

- TauroPace™
- Hautantiseptikum